

Enkel

Snabb

Skonsam

SpeediCath® Compact Eve®

Tappningskateter för kvinnor

Den mest diskreta katetern



Produktinformation

Användning

SpeediCath Compact Eve för kvinnor är en hydrofil tappningskateter för engångsbruk avsedd för ren intermittent kateterisering (RIK) vid svårighet att tömma urinblåsan.

Urinen tappas ut genom att katetern förs in i urinblåsan via urinröret.



Fördelar

- Liten, smidig och enkel att föra in
- Klar att använda direkt
- Jämnt hydrofilt ytskikt - för minimal friktion
- Rundade och belagda kateterögon - för maximal mjukhet och komfort
- Enkel¹, snabb¹ och skonsam² kateterisering.
- Minimal förberedelse och få handhavandesteg säkerställer en hygienisk hantering
- Enkel enstegsöppning som öppnas genom en liten vridning
- Ergonomisk trekantig form som gör katetern enkel att greppa och kontrollera – även för personer med nedsatt handfunktion
- Trekantig form gör att katetern ligger still på plan yta
- Diskret design som ökar acceptansen och livskvaliteten vid kateterisering^{3,4}
- Tillräckligt kort för att vara diskret, tillräckligt lång för att tömma blåsan effektivt⁵
- Inbyggd konnektor som passar till på marknaden förekommande tillbehör
- Storlekar som passar kvinnor och flickor
- Återförslutningsbar för praktisk och hygienisk kassering
- Klar vätska utan risk för fläckar
- PVC-, latex- och ftalatfri

Katetern

Klar-att-använda direkt

Alla SpeediCath katetrar ligger i steril vätska och är klara för användning direkt.

Rundade och belagda kateterögon



Genom att använda en tillverkningsprocess speciellt utvecklad för SpeediCath, är kanterna på varje kateteröga väl avfasade för att skapa en mjuk övergång mellan kateterögonen och kateterns yta, för att göra kateteriseringen så komfortabel och skonsam som möjligt.

Koppling till urinpåse

Vid behov kan en urinpåse enkelt kopplas till en inbyggd konnektor. Katetern förblir steril när den kopplas till urinpåse.



Triple Action Coating Technology™

Alla SpeediCath katetrar har ett jämnt hydrofilt ytskikt för minimal friktion. Ytskiktet är utformat för att skydda uretra och är uppbyggd enligt följande:



1. Basytskiktet med hög viskositet, består av starkt tvärbundet PVP som säkerställer att ytskiktet förblir konstant under hela kateteriseringen.



2. Toppyskiktet med medium viskositet består av tvärbundet PVP med en konstant hög fuktighet, som gör ytan extremt hal och minimerar friktionen.



3. Steril vattenbaserad lösning med minimal viskositet gör ytan optimalt fuktad och klar att användas direkt.

Friktionstestad

Låg friktion vid in- och utförelse är viktigt för att minimera obehag och skydda urinröret. Objektiva laborietester visar att alla SpeediCath katetrar uppvisar lägre friktion än motsvarande hydrofila och lubricerade katetrar som ingått i samma test. Produkterna har testats direkt efter öppning samt 5 minuter efter öppning⁶.



Produktsortiment

SpeediCath Compact Eve	Ch storlek	Längd cm	Antal/fp.	Antal/tp	Coloplast art nr
Nelaton för flickor/kvinnor	● 10	8*	30	300	281109
	● 12	8*	30	300	281129
	● 14	8*	30	300	281149

*Effektiv längd, dvs kateterlängd exkl. handtagsdel

Användarinstruktioner

Produkten har en visuell och kännbar skarv som anger vridpunkt för öppning.

1. Vrid för att öppna
2. Dra handtaget rakt upp ca 2 cm tills du stöter på motstånd
3. Kateterisera

För fullständiga instruktioner hur SpeediCath Compact Eve ska användas, se separat bruksanvisning och steg-för-steg-instruktion på coloplast.se.

Förvaring

Förvaras i rumstemperatur såvida inte annan information anges på eller i förpackningen.

Hållbarhet

Hållbarhetstiden är två år. Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.

Sterilisering

Produkten är steriliserad med hjälp av strålning.

Coloplast Care

Helhetserbjudande med SpeediCath

Alla som använder SpeediCath tappningskatetrar erbjuds att gå med i Coloplast Care, ett kostnadsfritt medlemsprogram, som ger tillgång till:

- Personlig rådgivning, stöd och produktvägledning* via telefon eller hemsida.
- Medlemstidningen RIKare Vetande som ges ut tre gånger per år.
- Digitala verktyg, användarberättelser och nyhetsbrev som hjälper användaren att ta kontroll över sin livssituation.

*Kräver bekräftelse av giltig ordination

Anmälan till Coloplast Care görs via coloplast.se/coloplast-care, telefon 0300-332 56 eller via e-post se@coloplast.com.

Referenser:

1. Pascoe G, Clovis S. Evaluation of two coated catheters in intermittent self-catheterisation. Br J Nurs 2001;10:325-329.
2. Stensballe J et al. Hydrophilic coated catheters for intermittent catheterisation reduce urethral micro trauma. Eur Urol 2005;48(6):978-983.
3. Chartier-Kastler E et al. A prospective, randomized, crossover, multicenter study comparing quality of life using compact versus standard catheters for intermittent self-catheterization. J Urol 2013;190(3):942-947.
4. SCCE Evaluation (n=161), September 2015, Data on file.
5. Biering-Sørensen F, Hansen HV, Nielsen PN, et al. Residual urine after intermittent catheterization in females using two different catheters. Scand J Urol Nephrol 2007;41(4):341-345
6. Data on file