

Enkel

Snabb

Skonsam

SpeediCath® Compact Male

Tappningskateter för män

Den första kompakta katetern för män



Produktinformation

Användning

SpeediCath Compact Male är en hydrofil tappningskateter för engångsbruk avsedd för ren intermittent kateterisering (RIK) vid svårighet att tömma urinblåsan.

Urinen tappas ut genom att katetern förs in i urinblåsan via urinröret.



Fördelar

- Klar att använda direkt
- Jämnt hydrofilt ytskikt - för minimal friktion
- Rundade och belagda kateterögon - för maximal mjukhet och komfort
- Enkel¹, snabb¹ och skonsam² kateterisering
- Minimal förberedelse och få handhavandesteg säkerställer en hygienisk hantering
- Enkel att greppa och öppna, även för personer med nedsatt handfunktion
- Teleskopfunktion som gör katetern stadig och enkel att centrera i urinröret utan att behöva vidröra ytskiktet under kateteriseringen^{3,4}
- Diskret och kompakt design som leder till följsamhet och bättre livskvalitet^{5,6}
- Återförslutningsbar kateter för praktisk och hygienisk kassering
- Enkel att ta med och förvara
- Kan enkelt kopplas till urinpåse
- Konnektor som passar till på marknaden förekommande tillbehör
- Klar vätska utan risk för fläckar
- PVC-, latex- och ftalatfri

Ostomy Care | Continence Care | Wound and Skin Care | Interventional Urology | Voice and Respiratory Care

Coloplast AB, Box 10171, 434 22 Kungälv. Tel 0300-332 56. PM-19331
www.coloplast.com Coloplast logo är ett registrerat varumärke, ägt av Coloplast A/S. © 2024-01 Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S

 **Coloplast**

Katetern

Klar att använda direkt

Alla SpeediCath katetrar ligger i steril vätska och är klara för användning direkt.

Rundade och belagda kateterögon



Genom att använda en tillverkningsprocess speciellt utvecklad för SpeediCath, är kanterna på varje kateteröga väl avfasade för att skapa en mjuk övergång mellan kateterögonen och kateterns yta, för att göra kateteriseringen så komfortabel och skonsam som möjligt.

Triple Action Coating Technology™

Alla SpeediCath katetrar har ett jämnt hydrofilt ytskikt för minimal friktion. Ytskiktet är utformat för att skydda uretra och är uppbyggt enligt följande:



1. Basytskiktet med hög viskositet, består av starkt tvärbundet PVP som säkerställer att ytskiktet förblir konstant under hela kateteriseringen.



2. Toppyskiktet med medium viskositet består av tvärbundet PVP med en konstant hög fuktighet, som gör ytan extremt hal och minimerar friktionen.



3. Steril vattenbaserad lösning med minimal viskositet gör ytan optimalt fuktad och klar att användas direkt.

Friktionstestad

Låg friktion vid in- och utförelse är viktigt för att minimera obehag och skydda urinröret. Objektiva laborietester visar att alla SpeediCath katetrar uppvisar lägre friktion än motsvarande hydrofila och lubricerade katetrar som ingått i samma test. Produkterna har testats direkt efter öppning samt 5 minuter efter öppning³.



Produktsortiment

SpeediCath Compact Male	Ch storlek	Längd cm	Antal/ fp	Antal/ tpf	Coloplast art nr
Nelaton för män	Ch 12/18*	34**	30	300	286929

*En flexibel del i Ch 12 och en stadigare del i Ch 18

** Totallängd

Användarinstruktioner

1. Öppna förpackningen genom att vrida på locket.
2. Dra den vita konnektorn uppåt för att frigöra katetern. Ett klickljud säkerställer att den är klar att användas.
3. Kateterisera

För fullständiga instruktioner hur SpeediCath Compact Male ska användas, se separat bruksanvisning och steg-för-steg-instruktion på coloplast.se.

Förvaring

Förvaras i rumstemperatur såvida inte annan information anges på eller i förpackningen.

Hållbarhet

Hållbarhetstiden är två år. Använd produkten före det utgångsdatum som finns angivet på förpackningen.

Sterilisering

Produkten är steriliserad med hjälp av strålning.

Coloplast Care

Helhetserbjudande med SpeediCath

Alla som använder SpeediCath tappningskatetrar erbjuds att gå med i Coloplast Care, ett kostnadsfritt medlemsprogram, som ger tillgång till:

- Personlig rådgivning, stöd och produktvägledning* via telefon eller hemsida.
- Medlemstidningen RIKare Vetande som ges ut tre gånger per år.
- Digitala verktyg, användarberättelser och nyhetsbrev som hjälper användaren att ta kontroll över sin livssituation.

*Kräver bekräftelse av giltig ordination

Anmälan till Coloplast Care görs via coloplast.se/coloplast-care, telefon 0300-332 56 eller via e-post se@coloplast.com.

Referenser:

1. Pascoe G, Clovis S. Evaluation of two coated catheters in intermittent self-catheterisation. Br J Nurs 2001;10:325-329.
2. Stensballe J et al. Hydrophilic coated catheters for intermittent catheterisation reduce urethral micro trauma. Eur Urol 2005;48(6):978-983.
3. Data on file
4. Bagi P et al. Safety of a new compact male intermittent catheter: a randomized, cross-over, single blind study in healthy male volunteers. Urol Int 2011;86:179-184.
5. SCCM Evaluation (n=482), November 2016, Data on file.
6. Chartier-Kastler E et al. A prospective, randomized, crossover, multicenter study comparing quality of life using compact versus standard catheters for intermittent self-catheterization. J Urol 2013;190(3):942-947.