

Enkel

Snabb

Skonsam

SpeediCath® Compact Set

Tappningskateter för män

En allt-i-ett-kateter för ökad frihet



Integrerat handtag

Produktinformation

Användning

SpeediCath Compact Set Male är en hydrofil tappningskateter för engångsbruk med uppsamlingspåse, avsedd för ren intermitternt kateterisering (RIK) vid svårighet att tömma urinblåsan.

Urinen tappas ut genom att katetern förs in i urinblåsan via urinröret.



Fördelar

- Klar-att-använda direkt
- Jämnt hydrofilt ytskikt - för minimal friktion
- Rundade och belagda kateterögon - för maximal mjukhet och komfort
- Enkel¹, snabb¹ och skonsam² kateterisering
- Integrerad lösning med både kateter och urinpåse i en och samma produkt
- Enkel att använda för personer som inte kan katetrisera direkt i toaletten
- Minimal förberedelse och få handhavandesteg
- Enkel att öppna, även för personer med nedsatt handfunktion
- Teleskopfunktion som gör katetern enkel att centrera i urinröret utan att behöva vidröra ytskiktet under kateteriseringen^{3,4}
- Integrerat handtag som ger en hygienisk kateterisering
- Diskret och kompakt design som leder till följsamhet och bättre livskvalitet³
- Diskret och enkel att ta med och förvara
- Återförslutningsbar kateter för praktisk och hygienisk kassering
- Klar vätska utan risk för fläckar
- PVC-, latex- och ftalatfri

Katetern

Klar att använda direkt

Alla SpeediCath katetrar ligger i steril vätska och är klara för användning direkt.

Rundade och belagda kateterögon



Genom att använda en tillverkningsprocess speciellt utvecklad för SpeediCath, är kanterna på varje kateteröga väl avfasade för att skapa en mjuk övergång mellan kateterögonen och kateterns yta, för att göra kateteriseringen så komfortabel och skonsam som möjligt.

Uppsamlingspåsen

- Volym 750 ml
- Graderad påse
- Avrivningsflik för tömning

Triple Action Coating Technology™

Alla SpeediCath katetrar har ett jämnt hydrofilt ytskikt för minimal friktion. Ytskiktet är utformat för att skydda uretra och är uppbyggt enligt följande:



1. Basytskiktet med hög viskositet, består av starkt tvärbundet PVP som säkerställer att ytskiktet förblir konstant under hela kateteriseringen.



2. Toppyskiktet med medium viskositet består av tvärbundet PVP med en konstant hög fuktighet, som gör ytan extremt hal och minimerar friktionen.



3. Steril vattenbaserad lösning med minimal viskositet gör ytan optimalt fuktad och klar att användas direkt.

Friktionstestad

Låg friktion vid in- och utförelse är viktigt för att minimera obehag och skydda urinröret. Objektiva laborietester visar att alla SpeediCath katetrar uppvisar lägre friktion än motsvarande hydrofila och lubricerade katetrar som ingått i samma test. Produkterna har testats direkt efter öppning samt 5 minuter efter öppning⁴.



Produktsortiment

SpeediCath Compact Set	Ch storlek	Längd cm	Volym ml	Antal/ fp	Antal/ tpf	Coloplast art nr
Nelaton för män	○ ## 12/18*	30**	750	20	60	284229

*En flexibel del i Ch 12 och en stadigare del i Ch 18

**Kateterlängd exkl. handtagsdel

Användarinstruktioner

1. Vrid vid markerad vridpunkt och avlägsna hylsan
2. Veckla ut påsen
3. Dra den vita konnektorn uppåt för att frigöra katetern. Ett klickljud säkerställer att den är klar att användas.
4. Kateterisera

För fullständiga instruktioner hur SpeediCath Compact Set Male ska användas, se separat bruksanvisning och steg-för-steg-instruktion på coloplast.se.

Förvaring

Förvaras i rumstemperatur såvida inte annan information anges på eller i förpackningen.

Hållbarhet

Hållbarhetstiden är två år. Använd produkten före det utgångsdatum som finns angivet på förpackningen.

Sterilisering

Produkten är steriliserad med hjälp av strålning.

Coloplast Care

Helhetserbjudande med SpeediCath

Alla som använder SpeediCath tappningskatetrar erbjuds att gå med i Coloplast Care, ett kostnadsfritt medlemsprogram, som ger tillgång till:

- Personlig rådgivning, stöd och produktvägledning* via telefon eller hemsida.
- Medlemstidningen RIKare Vetande som ges ut tre gånger per år.
- Digitala verktyg, användarberättelser och nyhetsbrev som hjälper användaren att ta kontroll över sin livssituation.

*Kräver bekräftelse av giltig ordination

Anmälan till Coloplast Care görs via coloplast.se/coloplast-care, telefon 0300-332 56 eller via e-post se@coloplast.com.

Referenser:

1. Pascoe G, Clovis S. Evaluation of two coated catheters in intermittent self-catheterisation. Br J Nurs 2001;10:325-329.
2. Stensballe J et al. Hydrophilic coated catheters for intermittent catheterisation reduce urethral micro trauma. Eur Urol 2005;48(6):978-983w.
3. Chartier-Kastler E et al. A prospective, randomized, crossover, multicenter study comparing quality of life using compact versus standard catheters for intermittent self-catheterization. J Urol 2013;190(3):942-947.
4. Data on file