

Enkel

Snabb

Skonsam

SpeediCath® Flex

Tappningskateter för män

Den enda katetern med skyddshölje och flexibel olivtipp

Produktinformation

Användning

SpeediCath Flex för män är en hydrofil tappningskateter för engångsbruk avsedd för ren intermittent kateterisering (RIK) vid svårighet att tömma urinblåsan.

Den är klar att använda direkt.

Urinen tappas ut genom att katetern förs in i urinblåsan via urinröret.



Fördelar

- Jämnt hydrofilt ytskikt - för minimal friktion
- Rundade och belagda kateterögon - för maximal mjukhet och komfort
- Enkel¹, snabb¹ och skonsam² kateterisering
- Flexibel och väl rundad olivtipp för skonsam och enkel navigering
- Skyddshölje som gör katetern greppvänlig och enkel att föra in steg för steg på ett hygieniskt och kontrollerat vis
- Peel-open förpackning - greppvänliga flikar
- Klisteretikett på förpackningen som säkerställer att katetern hänger på plats
- Återförslutningsbar kateter och förpackning för praktisk och hygienisk kassering
- Vikbar förpackning och produkt
- Tillgänglig i standard och fickformat
- Förpackning med diskret icke-mediciniskt utseende
- Förpackning som är enkel att öppna, ta med och förvara
- Kan enkelt kopplas till urinpåse
- Konnektor som passar till på marknaden förekommande tillbehör
- Klar vätska utan risk för fläckar
- PVC-, latex- och ftalatfri

Ostomy Care | Continence Care | Wound and Skin Care | Interventional Urology | Voice and Respiratory Care

Coloplast AB, Box 10171, 434 22 Kungälv. Tel 0300-332 56. PM-19334
www.coloplast.com Coloplast logo är ett registrerat varumärke, ägt av Coloplast A/S. © 2023-12 Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S

Katetern

Klar-att-använda direkt

Alla SpeediCath katetrar ligger i steril vätska och är klara för användning direkt.

Rundade och belagda kateterögon



Genom att använda en tillverkningsprocess speciellt utvecklad för SpeediCath, är kanterna på varje kateteröga väl avfasade för att skapa en mjuk övergång mellan kateterögonen och kateterns yta, för att göra kateteriseringen så komfortabel och skonsam som möjligt.



Triple Action Coating Technology™

Alla SpeediCath katetrar har ett jämnt hydrofilt ytskikt för minimal friktion. Ytskiktet är utformat för att skydda uretra och är uppbyggd enligt följande:



1. Basytskiktet med hög viskositet, består av starkt tvärbundet PVP som säkerställer att ytskiktet förblir konstant under hela kateteriseringen.



2. Toppyskiktet med medium viskositet består av tvärbundet PVP med en konstant hög fuktighet, som gör ytan extremt hal och minimerar friktionen.



3. Steril vattenbaserad lösning med minimal viskositet gör ytan optimalt fuktad och klar att användas direkt.

Skyddshölje och flexibel olivtipp

SpeediCath Flex är försedd med ett torrt skyddshölje med mjukt och justerbart handtag som gör katetern greppvänlig och enkel att hygieniskt föra in. Införandet sker steg för steg på ett kontrollerat sätt, utan att man behöver ta på kateterns yta. Genom att klämma åt handtagets smala, mjuka del kan kateterns rörelse pausas.


SpeediCath Flex har också en flexibel, rundad olivtipp som säkerställer enkel och skonsam navigering genom böjar och eventuella hinder i det manliga urinröret.

Friktionstestad

Låg friktion vid in- och utförelse är viktigt för att minimera obehag och skydda urinröret. Objektiva laborietester visar att alla SpeediCath katetrar uppvisar lägre friktion än motsvarande hydrofila och lubricerade katetrar som ingått i samma test. Produkterna har testats direkt efter öppning samt 5 minuter efter öppning⁴.



Produktsortiment

SpeediCath Flex	Ch storlek	Längd cm	Antal/ fp	Antal/ tfp	Coloplast art nr
Olivtipp för män	● 10	44	30	120	289109
Fickformat	⊗#12	44	30	120	289129
	● 14	44	30	120	289149
Olivtipp för män	● 10	44	30	60	289209
Standardformat	⊗#12	44	30	60	289229
	● 14	44	30	60	289249
	● 16	44	30	60	289169

Användarinstruktioner

För instruktioner hur SpeediCath Flex ska användas, se separat bruksanvisning och steg-för-steg-instruktion på coloplast.se.

Förvaring

Förvaras i rumstemperatur såvida inte annan information anges på eller i förpackningen. Skydda produkten från solljus.

Hållbarhet

Hållbarhetstiden är två år. Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.

Sterilisering

Produkten är steriliserad med hjälp av strålning.

Coloplast Care

Helhetserbjudande med SpeediCath

Alla som använder SpeediCath tappningskatetrar erbjuds att gå med i Coloplast Care, ett kostnadsfritt medlemsprogram, som ger tillgång till:

- Personlig rådgivning, stöd och produktvägledning* via telefon eller hemsida.
- Medlemstidningen RIKare Vetande som ges ut tre gånger per år.
- Digitala verktyg, användarberättelser och nyhetsbrev som hjälper användaren att ta kontroll över sin livssituation.

*Kräver bekräftelse av giltig ordination

Anmälan till Coloplast Care görs via coloplast.se/coloplast-care, telefon 0300-332 56 eller via e-post se@coloplast.com.

Referenser:

1. Pascoe G, Clovis S. Evaluation of two coated catheters in intermittent self-catheterisation. Br J Nurs 2001;10:325-329.
2. Stensballe J et al. Hydrophilic coated catheters for intermittent catheterisation reduce urethral micro trauma. Eur Urol 2005;48(6):978-983.
3. Data on file