



Så här använder du SpeediCath[®] Compact Eve

Innan du kateteriserar dig, tvätta händerna med tvål och vatten och försök att kissa.


Tips: Se instruktionsfilmen innan du använder SpeediCath Compact Eve första gången. Du kan se filmen genom att rikta mobilkameran mot QR-koden till höger eller gå in på coloplast.to/SCCE-instruktionsfilm

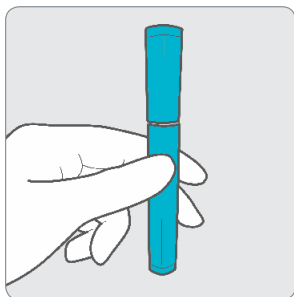

1. Håll katetern lodrätt, så handtaget (den breda delen) pekar uppåt.

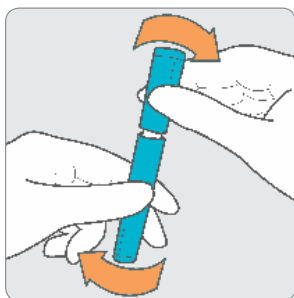


2. Öppna katetern genom att vrida handtaget åt valfritt håll.

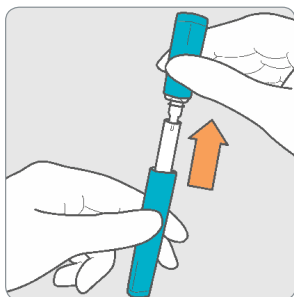


3. Dra handtaget rakt uppåt (ungefär 2 cm) tills du stöter på motstånd.

Vid behov av urinpåse, för du nu in urinpåsens konnektor i öppningen överst på handtaget. Se till att konnektorn är ordentligt ansluten. *Urinpåse med storlek om max 8,5 mm i diameter vid konnektortippen kan användas.*

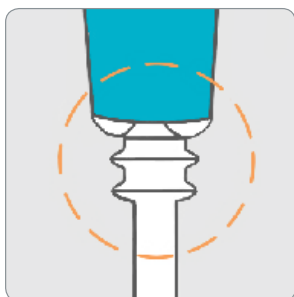


4. Fortsätt nu att dra ut hela katetern. Det är viktigt att du INTE vickar eller böjer katetern under öppnandet. De två ringarna under handtaget måste synas för att säkerställa att katetern är helt utdragen och klar för användning.

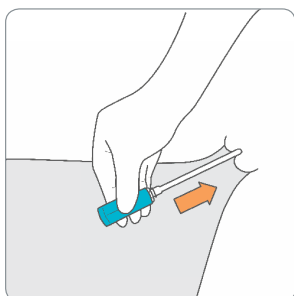

5. För in katetern i urinröret tills urinen börjar rinna.
6. När urinen slutat rinna, dra ut katetern en liten bit i taget. Om det börjar rinna urin igen, vänta tills blåsan är helt tömd innan du dra ut katetern helt.

Tips! För att lättare se urinrörsmynningen där katetern ska föras in, kan du ta hjälp av en spegel de första gångerna. För att säkerställa att blåsan är tom, kan du hosta till, röra på överkroppen eller krysta lätt innan katetern dras ut.

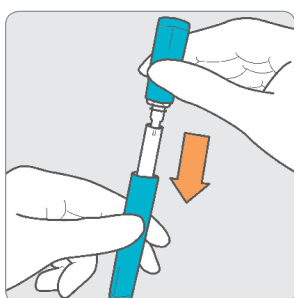

7. Efter användning kan katetern föras tillbaka in i förpackningen. Om en urinpåse har anslutits, måste den avlägsnas innan återförslutning.
8. Kassera produkten i hushållsavfallet. Produkten är avsedd för engångsbruk.