

Latex-fri

PVC-fri

Ftalat-fri

Conveen® Optima

Urindroppssamlare

Den smarta och diskreta lösningen



Produktinformation

Användning

Urindroppssamlare för män, används i kombination med en urinuppsamlingspåse. Anslutningen passar till de på marknaden förekommande urinuppsamlingspåsar.

Urinläckage (inkontinens) kan ha olika omfattning alltifrån några droppar till ofrivillig tömning av hela blåsan. En urindroppssamlare (uridom) ansluten till en urinuppsamlingspåse är en funktionell och bra lösning för män med urinläckage eller som har svårt att hinna till toaletten.

Huden kommer inte i kontakt med urin, som vid användning av absorberande skydd, så risken för hudirritation minskar och användaren slipper urinlukt.

Den är förpackad i en diskret förpackning som är lätt att ta med sig och enkel att öppna (se markerings pil).



Fördelar

- Silikon
- PVC-, ftalat- och latexfri
- Självhäftande
- Skonsam mot huden
- Knickfri
- Enkel applicering
- Dubbelstripp
- Diskret förpackning



Conveen Optima har tilldelats priset "Look Good Feel Good 2006" från British Association of Urological Nurses, för den mest innovativa kontinensprodukten. Conveen Optima har också tilldelats det internationella designpriset "Medical Design Excellence Award".



Ostomy Care | Continence Care | Wound and Skin Care | Interventional Urology | Voice and Respiratory Care

Coloplast AB, Box 10171, 434 22 Kungälv. Tel 0300-332 56, PM-26885
www.coloplast.com Coloplast logo är ett registrerat varumärke, ägt av Coloplast A/S. © 2024-03 Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S

 **Coloplast**

Funktioner

Conveen Optima är en självhäftande urindropsamlare i silikon som är skonsam mot huden. Genom att dra i dubbelstrippen rullas Conveen Optima enkelt och jämnt ut över penis och kramas sedan till för att få ordentligt fäste.



Knickfri


Urindropsamlaren är knickfri, vilket säkerställer att urinen rinner fritt i alla lägen. Konnektoring och räfflor gör att urinen passerar utan möjlighet till läckage.

Conveen Optima kan sitta på i ett dygn, innan det är dags att byta.






Användartips

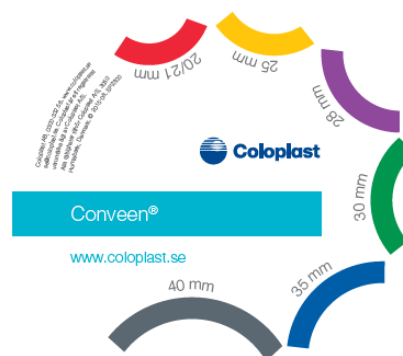



Vid tvätt av penis, använd inte återfettande tvål för att säkerställa att urindropsamlaren fäst ordentligt.

Det är viktigt att ha rätt storlek på urindropsamlaren. Penis ska mätas vid bredaste diametern i avslappnat tillstånd. Om storleken på penis är mellan två storlekar bör den mindre storleken väljas. Använd t ex Conveen mätsticka som kan beställas utan kostnad från Coloplast kundservice, tel 0300-332 99



Produktsortiment

Conveen Optima Standard	Omkrets mm	Diameter mm	Längd mm	Antal/fp	Antal/tp	Coloplast art nr
	80	25	85	30	480	220250
	85	28	85	30	480	220280
	90	30	85	30	480	220300
	105	35	85	30	480	220350
	125	40	85	30		220400

Conveen Optima Kort	Omkrets mm	Diameter mm	Längd mm	Antal/fp	Antal/tp	Coloplast art nr
	70	21	55	30	480	221210
	80	25	55	30	480	221250
	90	30	55	30	480	221300
	105	35	55	30	480	221350

Användarinstruktioner

För instruktioner hur Conveen Optima ska användas, se separat bruksanvisning.

Förvaring

Förvaras i rumstemperatur såvida inte annan information anges på eller i förpackningen.

Hållbarhet

Hållbarhetstiden är fem år. Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.

