

Conveen®

Urindroppssamlare



Produktinformation

Användning

Urindroppssamlare indiceras för manliga patienter som lider av urininkontinens.

Urinläckage (inkontinens) kan ha olika omfattning alltifrån några droppar till ofrivillig tömning av hela blåsan. En urindroppssamlare (uridom) ansluten till en urinuppsamlingspåse är en funktionell och bra lösning för män med urinläckage eller som har svårt att hinna till toaletten.

Huden kommer inte i kontakt med urin, som vid användning av absorberande skydd, så risken för hudirritation minskar och användaren slipper urinlukt.

Återanvändning av engångsprodukten rekommenderas inte då kontaminering kan förekomma.


Fördelar

- Latex
- Självhäftande
- Knickfri
- Enkel applicering
- Hygienisk

Användartips

Vid tvätt av penis, använd inte återfettande tvål för att säkerställa att urindroppssamlaren fäst ordentligt.

Det är viktigt att ha rätt storlek på urindroppssamlaren. Penis ska mätas vid bredaste diametern i avslappnat tillstånd. Om storleken på penis är mellan två storlekar bör den mindre storleken väljas. Använd t ex Conveen måttsticka som kan beställas utan kostnad från Coloplast kundservice, tel 0300-332 99

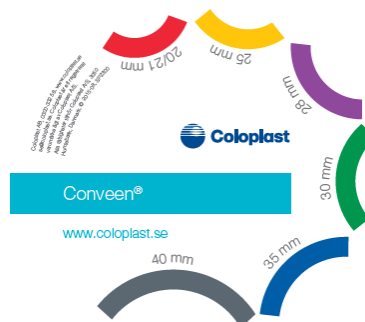

Funktioner

Urinläckage (inkontinens) kan ha olika omfattning; alltifrån några droppar till ofrivillig tömning av hela blåsan. En urindroppssamlare (uridom) ansluten till en urinuppsamlingspåse är en funktionell och bra lösning för män med urinläckage eller som har svårt att hinna till toaletten. Huden kommer inte i kontakt med urin, som vid användning av absorberande skydd, så risken för hudirritation minskar och användaren slipper urinlukt.

Knickfri

Urindroppssamlaren är knickfri, vilket säkerställer att urinen rinner fritt i alla lägen. Conveen urindroppssamlare är tillverkad av latex.

Självhäftande






Självhäftande urindroppssamlare gör fixeringen enkel och hygienisk tack vare applikatorn och den inbyggda häftan. Vid användning, placeras urindroppssamlaren över ollonet och rullas ut, applikatorn tas bort och urindroppssamlaren kramas till för att få ordentligt fäste runt penis.






Conveen kan sitta på i ett dygn, innan det är dags att byta.

Häftremsa

Conveen urindroppssamlare finns även med häftremsa. Häftremsan av curagard är elastiskt och fäster på båda sidor. Häftremsan placeras runt penis mot penisroten och urindroppssamlaren rullas ut över det.

Produktsortiment

Conveen	Omkrets mm	Diameter mm	Längd mm	Antal/fp	Antal/TFP	Coloplast art nr
Självhäftande med applikator	 70	20	105	90	90	052120
	 80	25	105	90	90	052000
	 90	30	105	90	90	052050
	 105	35	105	90	90	052100
	 125	40	105	90	90	052150

Conveen	Omkrets Mm	Diameter Mm	Längd mm	Antal/fp	Antal/TFP	Coloplast art nr
Kombipack med häftremsa	 70	20	105	30	480	051200
	 80	25	105	30	480	051250
	 90	30	105	30	480	051300
	 105	35	105	30	480	051350
	 125	40	105	30	480	051400
Häftremsa			113 x 16	20	500	051001

Användarinstruktioner

För instruktioner hur Conveen ska användas, se separat bruksanvisning.

Förvaring

Förvaras i rumstemperatur såvida inte annan information anges på eller i förpackningen.

Hållbarhet

Hållbarhetstiden är tre år. Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.

