



Peristeen® Plus

Transanal irrigation med ballongkateter

För trygg & enkel tarmkontroll



Produktinformation

Användning

Peristeen Plus med ballongkateter är ett transanalt och slutet irrigationssystem avsett för tömning av innehållet i den nedre delen av tjocktarmen. Transanal irrigation (TAI) utförs genom att tillföra vatten i tarmen via ändtarmen med hjälp av en ballongkateter medan man sitter på toaletten.

Fördelar

- Peristeen Plus är en vidareutveckling av det väletablerade transala irrigationssystemet Peristeen®:
- Det första transanala irrigationssystemet (TAI)
 - Det första och enda TAI-systemet som påvisat klinisk effekt i tre kontrollerade & randomiserade studier^{1,2,3}
 - Det första och enda TAI-systemet ackrediterat av NICE⁴

Peristeen Plus är ergonomiskt utformad för att vara användarvänlig, även för personer med nedsatt handfunktion:

- Kopplingar med användarvänlig vrid- och låsfunktion
- Kateter med greppvänlig design
- Kontrollenhet med intuitiva symboler
- Kontrollenhet med greppvänligt reglage som är lätt att vrida
- Vattentemperaturindikator för att enkelt kunna avgöra om vattentemperaturen är inom rekommenderat intervall
- Praktiska råd, inspiration och support för bättre tarmkontroll, rutin och följsamhet till behandlingen genom vårt kostnadsfria supportprogram Coloplast Care

Har du frågor om våra produkter?

Kontakta något av våra team nedan.

Consumer Care för privatpersoner: 0300-332 56

Kundservice för vårdpersonal: 0300-332 99

Indikationer

Peristeen Plus är indikerad för patienter som lider av avföringsinkontinens, kronisk förstoppning och/eller tidskrävande tarmhanteringsprocedurer. Produkten är indikerad för vuxna samt barn från tre år.

Kontraindikationer

Peristeen Plus transanal irrigation ska inte användas i följande situationer, eftersom den mekaniska obstruktionen eller den försvagade vävnaden i tjocktarmen orsakad av något av nedanstående ökar risken för tarmperforering, trauma eller blödning:

- Känd anal eller kolorektal stenosis
- Kolorektalcancer (aktiv/recidiv)
- Inom 3 månader efter anal eller kolorektal kirurgi
- Inom 4 veckor efter endoskopisk polypektomi
- Ischemisk kolit
- Akut inflammatorisk tarmsjukdom
- Akut divertikulit

Eftersom listan inte är komplett måste läkare/sjukvårdspersonal alltid även överväga individuella faktorer.




Funktioner

Vattenpåse med skruvlock inkl. fliplock

Vattenpåsen fylls med max 1000 ml rent kranvatten eller flaskvatten utan kolsyra. Den måste fyllas helt för att fungera ordentligt och för att kunna stå på golvet. Vattenpåsen är försedd med volymgradering. Den är även försedd med handtag nära skruvlocket för att enkelt kunna hanteras och flyttas samt en ögla för att kunna hängas upp och ner på tork efter användning. Skruvlocket är försett med ett fliplock som används vid påfyllning och tömning av påsen.

Vattentemperaturindikator

Den runda temperaturindikatorn på framsidan av vattenpåsen visar med färgerna blå, grön och röd om vattentemperaturen är inom rekommenderat intervall eller ej. Vattnet ska vara ljummet (34–40 °C). Om det är för varmt kan den känsliga tarmväggen ta skada, och om det är för kallt kan det leda till magkramp.

-  För kallt
-  Lämpligt för irrigation
-  För varmt

Rektal ballongkateter

Ballongkatetern är en rektal kateter med uppblåsbar ballong, mjuk rundad tipp och avfasade sidohål. Den uppblåsbara ballongen är utformad för att hålla katetern på plats. För att ballongkatetern skall vara lätt att föra in är den belagd med ett hydrofilt ytskikt som enkelt aktiveras i vatten före införandet. Ballongkatetern är enkel att greppa och föra in tack vare ett stort fingregrepp. Den är avsedd för engångsbruk och tillhandahålls i två storlekar; standard och small. Vårdpersonal, utbildad att använda och instruera handhavandet av Peristeen Plus transanal irrigation, fastställer vilken kateterstorlek och ballongvolym som ska användas för respektive person.

Standard ballong (kuff) kan innehålla en minsta volym på 220 ml eller max 4 fulla pumptag.





Small ballong (kuff) kan innehålla en minsta volym på 120 ml eller max 2 fulla pumptag.

Fixeringsband

Ett fixeringsband kan användas för att fästa kontrollenheten mot låret om extra stabilitet behövs när man pumpar vatten.

Kontrollenhet



	Avsluta och förvarasymbol	Avsluta för att torka och förvara produkten
	Ballongsymbol	Fylla ballongkatetern med luft och stoppa/pausa vattenflödet
	Vattenssymbol	Pumpa vatten
	Tömningssymbol	Tömna ballongkatetern på luft

Referenser:

1. Rosen HR, Kneist W, Fürst A, et al. Randomized clinical trial of prophylactic transanal irrigation versus supportive therapy to prevent symptoms of low anterior resection syndrome after rectal resection. *BJS Open*. 2019;3:461-465.
2. Enriquez-Navascues JM, Labaka-Arteaga IL, Aguirre-Allende I, et al. A randomized trial comparing transanal irrigation and percutaneous tibial nerve stimulation in the management of low anterior resection syndrome. *Colorectal Dis*. 2020;22(3):303-309.
3. Christensen P, Bazzocchi G, Coggrave M, et al. A randomized, controlled trial of transanal irrigation versus conservative bowel management in spinal cord-injured patients. *Gastroenterology*. 2006;131:738-747.
4. MTG 36. 2018. Peristeen Transanal Irrigation system for managing bowel dysfunction. <https://www.nice.org.uk/guidance/mtg36>.

Produktsortiment

*trp=transportförpackning

Peristeen Plus System	Innehåll (minsta beställningsbara enhet)	Antal/TFP*	Artikelnummer
Standard (inkl. necessär)	1 kontrollenhet, 2 ballongkatetrar Standard, 1 vattenpåse med skruvlock, 1 slang, 2 fixeringsband, 1 necessär.	6 system/TFP	291400
Standard (exkl. necessär)	1 kontrollenhet, 2 ballongkatetrar Standard, 1 vattenpåse med skruvlock, 1 slang, 2 fixeringsband	6 system/TFP	291410
Small (inkl. necessär)	1 kontrollenhet, 2 ballongkatetrar Small, 1 vattenpåse med skruvlock, 1 slang, 2 fixeringsband, 1 necessär	6 system/TFP	291470
Small (exkl. necessär)	1 kontrollenhet, 2 ballongkatetrar Small, 1 vattenpåse med skruvlock, 1 slang, 2 fixeringsband	6 system/TFP	291480

Peristeen Plus Tillbehör	Innehåll (minsta beställningsbara enhet)	Antal/TFP*	Artikelnummer
Tillbehörssset Standard	15 ballongkatetrar Standard och 1 vattenpåse per set	10 set/TFP	291420
Ballongkatetrar Standard	10 ballongkatetrar Standard	100 st/TFP	291431
Ballongkatetrar Small	10 ballongkatetrar Small per set	100 st/TFP	291501
Fixeringsband	20 Fixeringsband	200 st/TFP	291450
Slangset	2 slangar per set	10 set/TFP	291460
Tillbehörssset Small	15 ballongkatetrar Small och 1 vattenpåse per set	10 set/TFP	291490

Hantering

Användarinstruktioner

För instruktioner hur Peristeen Plus ska användas, se separat bruksanvisning och steg-för-steg guide.

Rengöring och förvaring

Med undantag för ballongkatetern, som är för engångsbruk, kan alla komponenter vid behov tvättas i mildt tvålsvatten. Fixeringsbandet kan tvättas i 60 °C och hängas upp för att torka. När produkten har torkat ska den förvaras i rumstemperatur och skyddas från direkt solljus, företrädesvis i necessären. Säkerställ att slangarna inte är veckade och att systemet och alla dess delar hålls borta från vassa föremål.

Hållbarhet och byte

Produktkomponent	Antal tillåtna återanvändningstillfällen
Skruvlock	90
Vattenpåse	15
Kontrollenhet	90
Slang	90
Ballongkatetrar	Endast engångsbruk
Fixeringsband	Byt ut när elasticiteten försvagas

Hållbarhetstid (shelf life) är 3 år för samtliga ingående delar.

Coloplast Care

Helhetserbjudande med Peristeen Plus

Coloplast Care anses vara det bästa supportprogrammet för tarmkontroll enligt vårdgivare⁵. För att lyckas med en ny typ av behandling är det viktigt att man lär sig grunderna och skapar en rutin som fungerar väl. Därför erbjuds alla som använder Peristeen Plus ett kostnadsfritt supportprogram - Coloplast Care - som ger tillgång till:

- Personlig kontakt med utbildade rådgivare i 18 månader
- Rådgivare som är experter och måna om att hjälpa användare att komma igång och lyckas med behandlingen
- Praktiska råd, inspiration och support för bättre tarmkontroll, rutin och följsamhet till behandlingen
- Individuellt behovsanpassat stöd via telefon när användaren behöver det
- Rådgivning som utgår från en problemlösningssguide framtagen av bland annat experter inom tarm och TAI.
- Rådgivning enbart kring produktrelaterade frågor
- Skriftlig information såsom handbok, motiverande brev och faktablad kring olika ämnen som är relevanta för personer med tarmbesvär

Anmälan till Coloplast Care görs via hemsidan: www.coloplast.se/coloplast-care alternativt via telefon: 0300-332 56 eller via mail: se@coloplast.com.

Referens:
5. Integron Usage and Attitude Survey Bowel Management, Healthcare Professional and Patient, Nederländerna, 2019.