

# Tappningskateter för män

- Hydrofilt ytskikt
- Klar efter 30 sekunder
- Ytbehandlade kateterögon



# EasiCath®

## Tappningskateter

### Blåstömning med RIK-metoden

Blåstömningssproblem innebär svårighet att tömma urinblåsan fullständigt och kan bero på olika orsaker. För att undvika de problem som det kan medföra, kan blåsan tömmas med tappningskateter enligt RIK-metoden (Ren Intermittent Kateterisering).

### EasiCath

Den hydrofila tappningskatetern EasiCath ligger i en steril förpackning som är lätt att öppna. Kateterförpackningen fylls med vanligt vatten och efter 30 sek har katetern fått en hal yta och är klar att använda. Önskas styvare kateter, fylls förpackningen med kallt vatten. För mjukare kateter fylls den istället med varmt vatten. Förpackningen är försedd med klisteretikett och hål, för att kunna hängas upp när den har fyllts med vatten. För så skonsam kateterisering som möjligt, är ytskiktet belagt med hydrofil yta efter det att kateterögonen har gjorts. Friktionen mellan katetern och urinröret blir på så sätt minimal.

### Dilatation

EasiCath Dilatation har inga kateterögon och är avsedd för dilatation (vidgning av urinröret). Kateterförpackningen fylls med vanligt vatten eller steril koksaltlösning (NaCl) och efter 30 sek har katetern fått en hal yta och är klar att använda. Inget annat glidmedel behövs.

### Luerlock

För intravesikulär instillation används EasiCath Luerlock, en hydrofil tappningskateter med nelatonspets. Kateterförpackningen fylls med vanligt vatten eller steril koksaltlösning (NaCl) och efter 30 sek har katetern fått en hal yta och är klar att använda. Inget annat glidmedel behövs.

EasiCath	Ch storlek	Längd cm	Förp styck	Coloplast art nr
Nelaton för pojkar/ungdom	● 08	30	30	050885
	● 10	30	30	050905
Nelaton för män	● 08	40	30	053485
	● 10	40	30	053505
	○ 12	40	30	053525
	● 14	40	30	053545
	● 16	40	30	053565
	● 18	40	30	053585
	● 20	40	30	053605
Tiemann för män	● 22	40	30	053625
	● 10	40	30	053805
	○ 12	40	30	053825
	● 14	40	30	053845
	● 16	40	30	053865
Luerlock Nelaton för män	● 18	40	30	053885
	● 08	40	30	052885
	● 10	40	30	052905
	○ 12	40	30	052925
	● 14	40	30	052945
Dilatation Nelaton	● 16	40	30	052965
	● 18	40	30	283165
	● 18	40	30	283185



#### Miljöfakta

Förpackning: Allt material är återvinningsbart, sortera och lämna på närmaste återvinningsstation. Vi är anslutna till FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Produkt: Vi rekommenderar att produkten går till sopförbränning med energitvinnning.



0543