


Brava[®] tillbehörsprodukter som neutraliserar lukt

Brava[®]

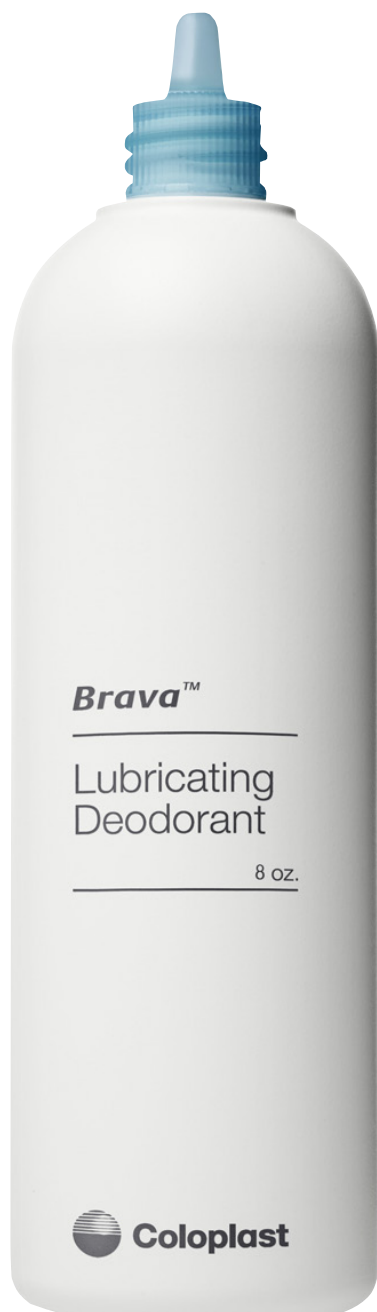

Brava[®] tillbehörssortiment är utvecklat för att begränsa risken för läckage, vårda huden och **neutralisera lukt.**

Brava Multismörjande Deodorant

Brava Multismörjande Deodorant neutraliserar lukt och har en multismörjande effekt, vilken säkerställer att påsens innehåll hamnar längst ned i påsen. Detta innebär att ingen avföring sitter kvar runt stomin och det underlättar även tömningen av påsen. Brava Multismörjande Deodorant är hudvänlig.

Droppta ett par droppar (5-10 ml) av Brava Multismörjande Deodorant i påsen och gnid sidorna försiktigt mot varandra så att dropparna fördelas jämnt på insidan av påsen.

Används en tömbar påse kan deodoranten appliceras genom utloppet i stomipå-

Brava Multismörjande Deodorant - dosförpackning

Dosförpackningen har samma egenskaper som innehållet i flaskan.



Multismörjande Deodorant

Produktnamn	Volym (ml)	Apoteks- varunummer	Artikel- nummer	Styck/fp
Multismörjande Deodorant Flaska	240	733261	120610	1
Multismörjande Deodorant Dosförpackning	7,5	733280	120600	20

Läs mer om Brava[®] tillbehörssprodukter på www.coloplast.se/provabrava eller kontakta vår kundservice på telefon 0300-332 56 (för privatpersoner) eller 0300-332 99 (för vårdpersonal).

Miljöfakta

Förpackning: Allt material är återvinningsbart, sortera och lämna på närmaste återvinningsstation. Vi är anslutna till FTI Förpacknings- och Tidningsinsamling.
Produkt: Vi rekommenderar att produkten går till sopförbränning med energiutvinning



[Ostomy Care](#) / [Continence Care](#) / [Wound & Skin Care](#) / [Urology Care](#)