


SenSura Urostomipåse


Underlättar hantering av uretärkatetrar

Det finns fyra grundprinciper för hantering av uretärkatetrar efter en urostomioperation. **SenSura** urostomipåsar är enkla och smidiga att använda i alla fyra fallen.

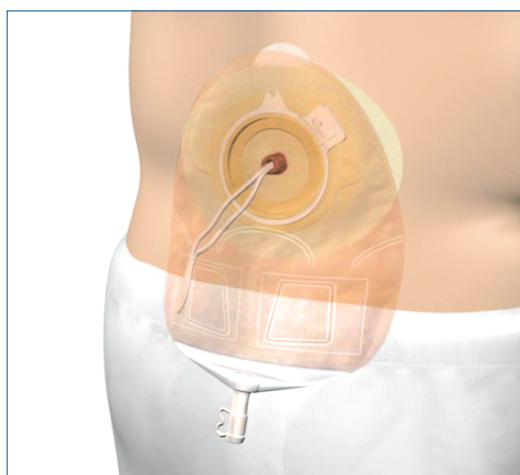


1. Uretärkatetrar kan föras ned i påsen

SenSura urostomipåse har fått ett bredare mellanrum vid svetsen. Uretärkatetrar kan nu enkelt föras ned i påsen förbi kamrarna.

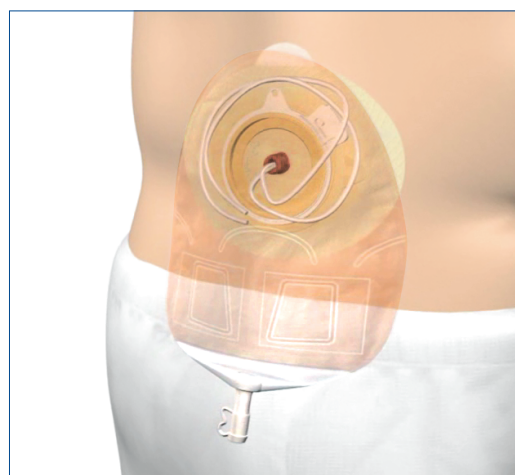


2. Uretärkatetrar kan rullas ihop i toppen på påsen

Uretärkatetrar kan rullas ihop och läggas i toppen på påsen. Detta är enkelt att kombinera med en **SenSura** Flex eller en **SenSura** Click häfta.

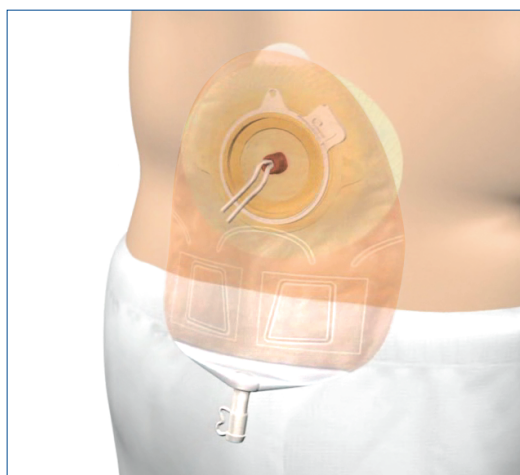

3. Uretärkatetrar kan klippas av

Uretärkatetrarna kan klippas av och placeras i påsen.

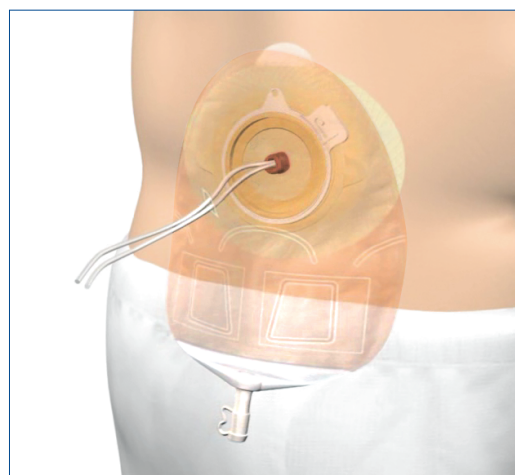

4. Uretärkatetrar kan föras ut genom påsens framsida

Uretärkatetrarna kan föras ut genom ett hål som du enkelt klipper upp på påsens framsida.

SenSura

 Coloplast

SenSura Urostomipåse

Diskret och bekväm

Den nya påsen är utvecklad i samarbete med vårdpersonal och patienter över hela världen.

Hudfärgad

Påsen finns nu i en diskret beige ton.

Kroppsformad

Påsen har gjorts smalare och formats så att den smidigt följer med i kroppsrörelserna och inte heller vrider sig när man sover.

Vattenavvisande stark non-woven

Det mjuka non-woven materialet är starkt och vattenavvisande.

Backventil

Förhindrar urin från att rinna tillbaka in mot stomin, vilket kan minska risken för urinvägsinfektioner.

Unik flerkammarpåse

Påsen består av flera små kamrar som fördelar urinen jämnt i påsen.


Det gör att:

- Påsen får en platt och diskret profil
- Skvalpljuden minskar

Utloppet går att gömma

Det mjuka utloppet är enkelt att använda och kan gömmas när det inte används*. Då behöver det inte ligga och skava mot huden, vilket gör påsen både diskret och bekväm.

* gäller hudfärgade varianter

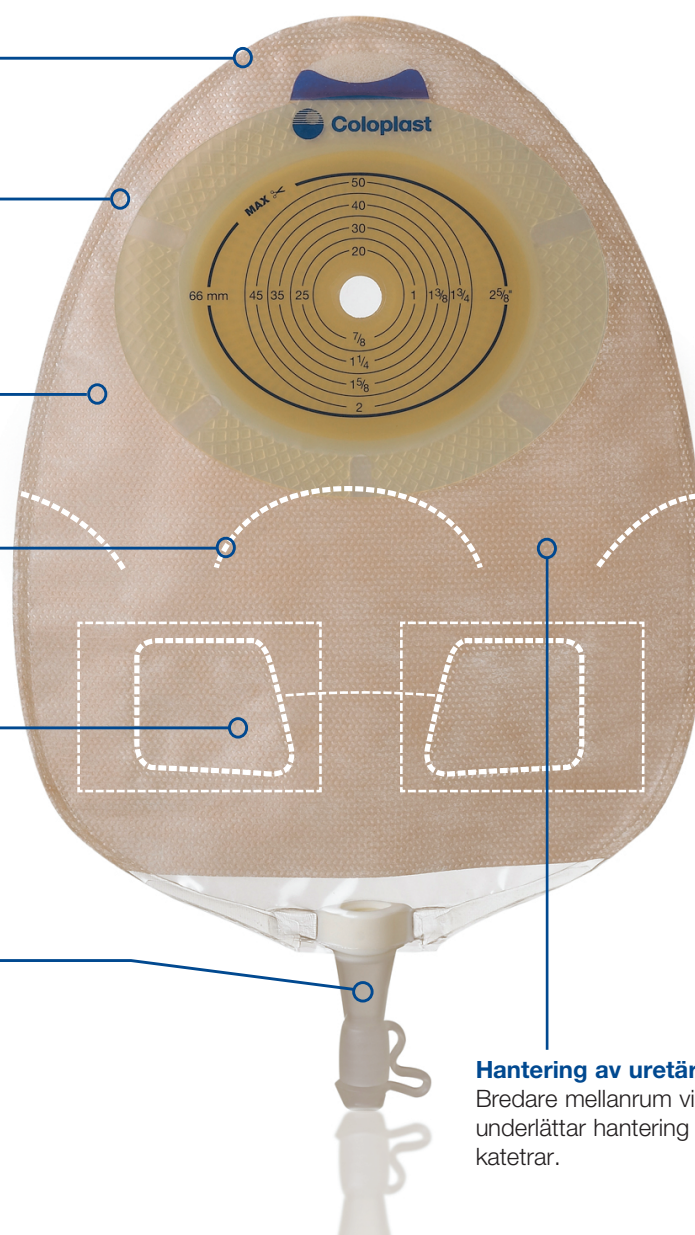

Hantering av uretärkatetrar

Bredare mellanrum vid svetsen underlättar hantering av uretärkatetrar.



Coloplast

Coloplast AB
Box 10171
434 22 Kungsbacka
Växel 0300-332 50
Kundservice 0300-332 56
Fax: 0300-188 66
e-post: se@coloplast.com
www.coloplast.se